



Restylane[®] LYFT™
The PERLANE collection
Injectable Gel

Restylane[®]
Injectable Gel 1 mL

+

= ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Restylane[®] & Restylane[®]
LYFT™

Το **δίδυμο της επιτυχίας** για τη θεραπεία των ασθενών σας

Restylane® & Restylane®

LYFT™

1 προσέγγιση που προσαρμόζεται
σε όλες τις ενδείξεις

1. ΘΕΡΑΠΕΙΑ του άνω ημιμορίου

2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

Ενδείξεις	Ρεολογικά χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν	Ενδεδειγμένα προϊόντα	Χαρακτηριστικά των gel
Μαύροι κύκλοι -Δακρυική αύλακα Ρινοπαραρειακές αύλακες (ήπιες) Χείλη Ρυτίδες λύψης ή μαριονέτας (ήπιες)	Προϊόν σταθερό, σφικτό, ελάχιστο υδρόφιλο, με μικρά σωματίδια HA που προσφέρει μεσαία αποκατάσταση όγκου	<i>Restylane</i>	Τεχνολογία NASHA** Σταθερότητα ● ● ● ● ● ● Μέγεθος σωματιδίων HA ● ○ ○ Ευέλικτο προϊόν
Ζυγωματικά Ρινοπαραρειακές αύλακες (έντονες) Ρυτίδες λύψης ή μαριονέτας (έντονες)	Προϊόν σφικτό, σκληρό, με μεγάλη δυνατότητα ανόρθωσης και αποκατάστασης όγκου (επίπεδο G'**-το υψηλότερο)	<i>Restylane</i> LYFT™	Τεχνολογία NASHA** Σταθερότητα ● ● ● ● ● ● Μέγεθος σωματιδίων HA ● ● ● Έντονη διόρθωση ρυτίδων

* NASHA: Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid (Μη ζωικής προέλευσης σταθεροποιημένο υαλουρονικό οξύ).

** G': Αντίσταση του gel στην παραμόρφωση.

Η τεχνολογία NASHA™*




Gel σταθερής υφής

- 1 επίπεδο σταυροσύνδεσης (σταθεροποίηση)
- 2 επίπεδα μεγέθους σωματιδίων HA

- 2 υφές gel


Σταθεροποίηση: ένας συνδυασμός συνέργειας

1. Διατήρηση των τρισδιάστατων φυσικών συμπλοκών του HA** (φυσική διασύνδεση)

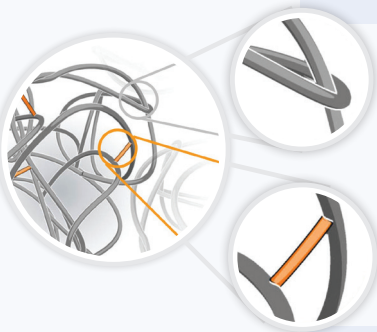

2. Σταθεροποίηση με προσθήκη $\approx 1\%$ cross linking (BDDE)

ΣΤΑΥΡΟΣΥΝΔΕΣΗ (σταθεροποίηση)
1 βαθμός σταθερότητας και αντίστασης στην παραμόρφωση

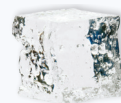

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ HA
2 ελεγχόμενοι και ομογενείς βαθμοί



2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΥΦΕΣ GEL



Restylane



Restylane Lyft

* NASHA: Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid (Μη ζωικής προέλευσης σταθεροποιημένο υαλουρονικό οξύ)

** HA: Hyaluronic Acid (Υαλουρονικό Οξύ)

Restylane® & Restylane®

LYFT™

1 μοναδική τεχνολογία ενάντια στα σημάδια του γήρατος

30-40 ΕΤΩΝ



Ρινοπαραρειακές αύλακες ήπιες
ή
Ρυτίδες λύπης ήπιες

40-50 ΕΤΩΝ



Ρινοπαραρειακές αύλακες έντονες
ή
Ρυτίδες λύπης έντονες

50 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ



Ρινοπαραρειακές αύλακες πολύ έντονες
και/ή
Ρυτίδες λύπης πολύ έντονες
και/ή
Χείλη

Restylane®

Restylane®

LYFT™

Restylane®

Restylane®

LYFT™



Restylane

Χείλη

Restylane lyft

Ρινοχειλικές αύλακες πολύ έντονες
Ρυτίδες λύπης πολύ έντονες

Στοχευμένη αποτελεσματικότητα



Αποδεδειγμένη **αποτελεσματικότητα**:
97% των ασθενών παρατήρησαν βελτίωση
κατά ≥ 1 βαθμό στην κλίμακα WSRS* μέσα σε 18 μήνες,
μετά από την 1^η συνεδρία Restylane®

97% (61/63 ασθενείς)

- Αποδεδειγμένη **αποτελεσματικότητα**
- **Διάρκεια** έως και **18 μήνες** με 1 συνεδρία


Restylane® & Restylane®

LYFT™


1 προσέγγιση, προσαρμοσμένη σε κάθε
ανάγκη του ασθενούς

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ
ΚΑΝΟΥΛΑ
προτεινόμενη

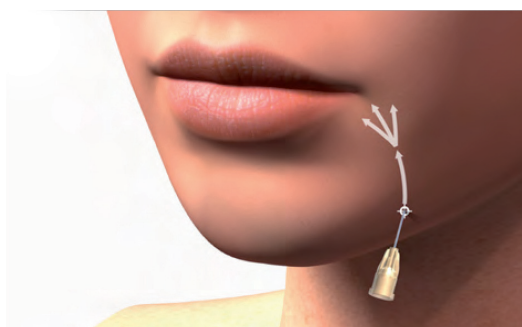

1. Narins R, Brandt F, Dayan S, Hornfeldt C. Persistence of nasolabial fold correction with hyaluronic acid dermal filler with retreatment: Results of an 18 Month Extension study. *Dermatol Surg.* 2011;37:S1-S7. Πολυκεντρική τυχαιοποιημένη ανοικτή μελέτη, διάρκειας 36 μηνών. T0, n=75, T36, n=27. Βασικά κριτήρια: αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα στους 36 μήνες από την εφαρμογή στις ρινοχειλικές αύλακες: 1^η θεραπεία συντήρησης στους 4,5 μήνες (n=67) ή στους 9 μήνες (n=63). 2^η θεραπεία συντήρησης στους 18 μήνες (n=40). Βελτίωση στους 36 μήνες ≥ 1 (WSRS) έναντι T0: Ερευνητής (27/27), ασθενής (20/27 και 21/27 με 1^η θεραπεία συντήρησης στους 4,5 μήνες και στους 9 μήνες αντιστοίχως).

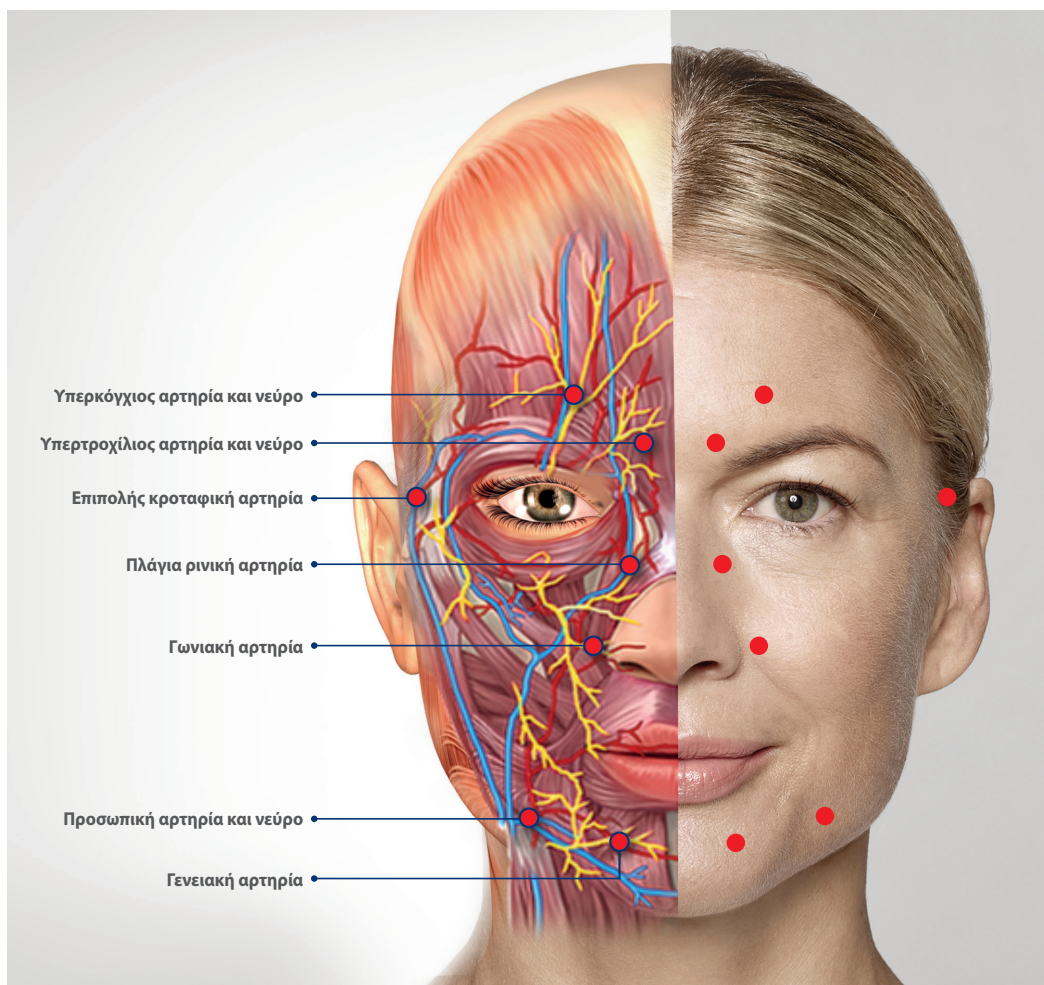

● **ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ**
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΕΜΒΟΛΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΝΕΚΡΩΣΗ

— Αρτηρία
— Φλέβα
— Λεμφικά αγγεία

Το δίδυμο της επιτυχίας για τη θεραπεία των ασθενών σας

Restylane



23 χρόνια εμπειρίας
από δημιουργίας του



Πάνω από 40 εκατομμύρια
θεραπείες ανά τον κόσμο



Ευέλικτο και σταθερό προϊόν

Restylane

LYFT™

**Αποτελεσματική διόρθωση
των έντονων ρυτίδων
και αποκατάσταση όγκου**



Μια προσέγγιση προσαρμοσμένη σε κάθε ανάγκη του ασθενούς

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες:

1/1.000 – 1/10.000: Πρήξιμο. 1/10.000 – 1/50.000: Αιμάτωμα, αποχρωματισμός, ερυθρή, μόλυνση, φλεγμονή, ισχαιμία/ νέκρωση, άλγος/ ευαισθησία, βλατίδες/ οζίδια. 1/50.000 – 1/100.000: Υπερευαίσθησία, σκλήρυνση, νευρολογικά συμπτώματα όπως παραισθήσεις, κνησμός, με βραχεία διάρκεια. <1/100.000: Απόστημα, ακμή, αγγειονευρωτικό οίδημα (οίδημα του Quincke), ατροφία/ ουλή, τριχοειδικά προβλήματα, όπως τηλεαγγειεκτασίες, δερματίτιδα, μετατόπιση του ενθέματος, συρίγγιο, κοκκίωμα, εξανθήματα, επανενεργοποίηση έρπητος, κνίδωση, προβλήματα στην όραση.

Restylane® Ιατρικές συσκευές τάξης III, CE 0344. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τις συγκεκριμένες οδηγίες για κάθε ένα από τα προϊόντα.

Q-Med AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala, Σουηδία. Διανέμονται από την Galderma-Q-Med, Tour Europlaza, 20, Avenue André Prothin, La Défense 4. 92927 LA DEFENSE CEDEX. Δεν είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο Άρθρο L. 165-1 του κώδικα κοινωνικής ασφάλισης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/2018

Εσωτερικός αριθμός αναφοράς: 18/03/GaldermaQM/PM/003 – RES/004/03/2018

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε άμεσα τον γιατρό σας. Απευθυνθείτε στην Lancy καλώντας στο +30 211 411 7006.

LANCY AE

Εμπορία Φαρμακευτικών & Ιατρικών Ειδών

2χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κορωπί, 19400 • 210 6447 754 • info@lancy.gr

lancy.gr

 **GALDERMA**

 **LANCY**
the secret of youth...